

TRATTAMENTI VISO INTEGRATI E AVANZATI

4 tecnologie in un'unica soluzione per migliorare tonicità, aspetto, elasticità e luminosità del viso, risolvendo qualsiasi tipo di inestetismo

Il dispositivo può essere abilitato con quattro diverse tecnologie per trattare le imperfezioni di viso e corpo.

ELETTROPORATORE MICRODERMO ABRASIONE AL DIAMANTE SPATOLA VISO RADIOFREQUENZA BIPOLARE

L'azione di vibrazione ultrasonica consente il distacco, "per spinta" delle cellule morte eliminando anche i residui cosmetici e le impurità depositate nei pori dilatati.

L'elettroporazione è una nuova tecnica che favorisce la veicolazione transdermica di dermocosmetici mirati mediante la depolarizzazione delle membrane cellulari epiteliali, con la creazione di canali preferenziali (elettropori) per il passaggio dei principi attivi, oltre alla polarizzazione delle molecole composte dei cosmetici.

La microdermoabrasione con punte di diamante è un trattamento di esfoliazione meccanica controllata e non invasiva, con azione levigante sullo strato epiteliale.

Migliora l'aspetto, il tono e la luminosità della pelle e ne ripristina l'elasticità.





L'apparato è dotato di un manipolo su cui si adattano diverse punte di diamante con differenti diametri e granulazioni. Si devono scegliere in base alla zona da trattare o in funzione della profondità che si desidera raggiungere nella pelle.

La radiofrequenza è consigliata nel trattamento dell'antiaging, per il rilassamento cutaneo del viso, per le cicatrici post-acne.

RF (radiofrequenza) è basata sull'emissione di onde che, attraversando i tessuti, inducono un'oscillazione molecolare che produce, per attrito, una ipertermia profonda (calore) che provoca la denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene nel connettivo favorendo un effetto di stiramento, tonificazione e compattezza tessutale.


Nel trattamento del viso la radiofrequenza stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene attenuando le rughe e donando alla pelle un effetto lifting naturale.

Questo dispositivo di radiofrequenza è stato concepito con diverse modalità di erogazione dell'onda elettromagnetica ad alta frequenza (455Khz) per garantire un utilizzo ed un risultato ottimale.

MULTIFUNZIONE VISO

Multi tecnologia di ultima generazione che risponde alle diverse esigenze di trattamenti lifting e rigeneranti del viso.

- Ultrasuoni: spatola a bassa frequenza
- Microdermoabrasione: con testine ai cristalli di diamante
- Veicolazione transdermica: elettroporazione a multifrequenza
- Veicolazione Superficiale e Profonda: elettroporazione a monofrequenza
- Radiofrequenza Bipolare Resistiva: rassodamento e neocollagenesi
- Cromoterapia: stimolazione neurosensoriale

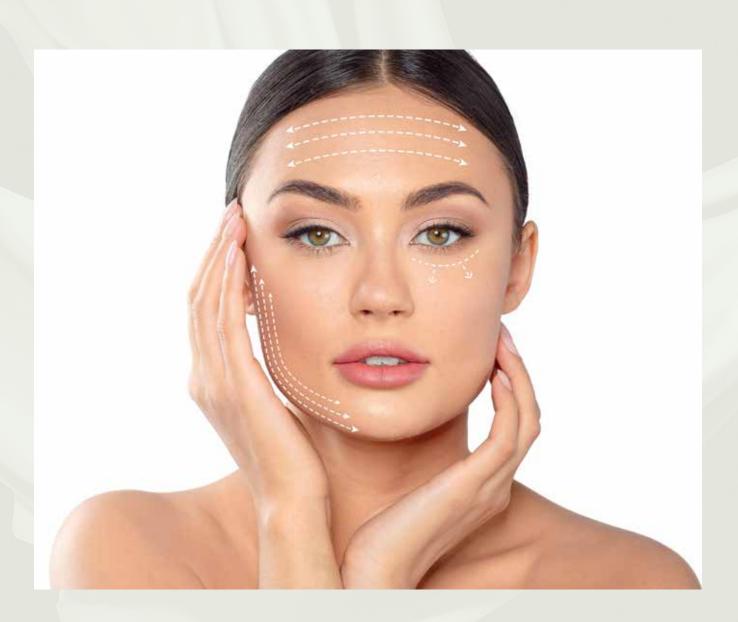

RISULTATI VISIBILI FIN DALLE PRIME SEDUTE

- · La pelle appare immediatamente più luminosa e distesa
- Utile in diversi trattamenti fra cui la pulizia del viso senza strizzatura
- · Possibilità di effettuare molteplici trattamenti
- La pelle viene "liftata"
- · Le imperfezioni tendono man mano a scomparire
- Viene prodotto nuovo collagene



Visibilità immediata e 3 volte più veloce



4 tecnologie attive in un'unica stazione di lavoro




Un'unica tecnologia risolve tutti gli inestetismi viso

SPA SKIN PLUS: TECNOLOGIE

ELETTROPORAZIONE CORPO VISO

SUPERFICIALE

Veicolazione transdermica: elettroporazione a multifrequenza-speciale manipolo a roller collegato a un flacone di cosmetico specifico, che con l'ausilio di un campo elettrico a micro corrente (vale sia per il viso che per il corpo).

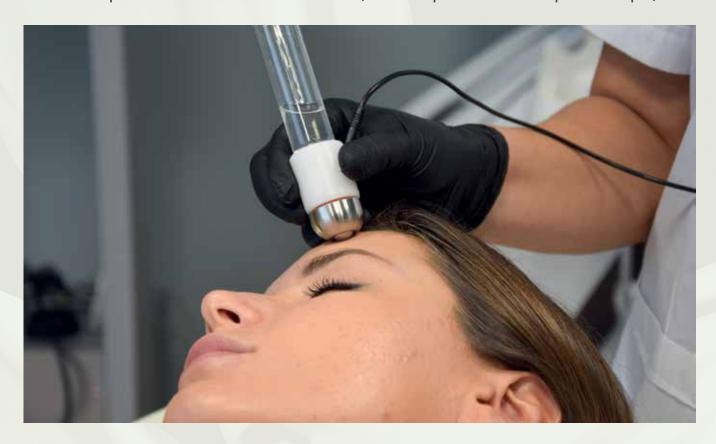

L'elettroporazione viso e corpo si esegue con uno speciale manipolo che con l'ausilio di un campo elettrico a micro corrente fa penetrare il cosmetico specifico, collegato al manipolo, all'interno della pelle aumentandone di molto l'efficacia. Il campo elettrico consente al cosmetico di essere attirato all'interno del tessuto.

Il trattamento di **Elettroporazione sul viso** serve per:

- tonificazione
- rughe
- discromie cutanee
- borse

Migliora notevolmente la pelle segnata dal tempo e dai raggi UV (con rughe e macchie scure), o se la cute ha perso elasticità con un tono non più giovane. Si possono trattare tutti gli inestetismi del viso dalle rughe al tono della pelle all'elasticità fino ad arrivare a risolvere ogni problematica.

Il trattamento di **Elettroporazione sul corpo** serve per:

- Cellulite
- Adiposità localizzate
- Rassodamento glutei
- Rimodellamento e tonificazione
- Smagliature
- Linfodrenaggio

SPATOLA

Con la spatola viso possiamo ottenere una pulizia della pelle in profondità senza la fastidiosa strizzatura ed in maniera piacevole per il cliente.



E' indicata nella prima fase per i pretrattamenti di pulizia e/o preparazione alla veicolazione transdermica. L'azione di vibrazione ultrasonica consente il distacco "per spinta" delle cellule morte eliminando anche i residui cosmetici e le impurità depositate nei pori dilatati.

Con la vibrazione si sollevano le creste delle membrane corneocitarie e si indeboliscono i legami dei lipidi epidermici, liberando uno strato di corneociti più giovane (turn-over cellulare) e rendendo la pelle più fine e luminosa.

MICRODERMABRASIONE


Manipolo su cui si adattano diverse punte di diamante, con differenti diametri e granulazioni e si devono scegliere in base alla zona da trattare o in funzione della profondità che si desideri raggiungere nella pelle.

L'operatore strofina il manipolo sulla pelle del cliente con movimenti accurati per esfoliare lo strato di cellule morte. La pelle dovrà essere prima detersa ed asciugata. Il manipolo incorpora un sistema di vuoto che aspira le cellule morte verso un filtro raccoglitore simultaneamente all'azione esfoliante.



RADIOFREQUENZA

La modalità resistiva bipolare prevede l'utilizzo di un manipolo con due elettrodi ad emissione ravvicinata per un lavoro specifico ed efficace sui fibroblasti, sul collagene e l'elastina. La sua azione stimola la produzione di nuove fibre di sostegno con conseguente miglioramento della compattezza e della tonicità tessutale.

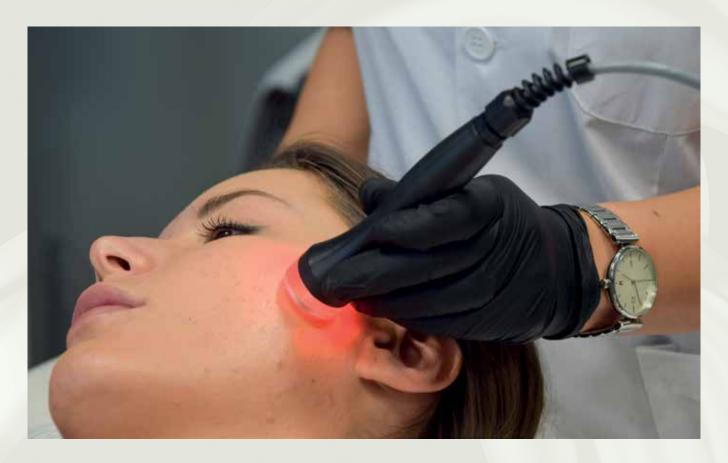

SPA SKIN PLUS - DOTAZIONI

1 Spatola ultrasuoni

Placche conduttive, spugna e fascia

1 Manipolo

veicolazione transdermica (epora) corpo con dosatore e cavo 1 Manipolo

veicolazione transdermica (epora) viso con dosatore e cavo

Manipolo porta testine di diamante, testine in acciaio con differenti dimensioni e livelli di granulazioni:

Area nasale 1x0,6 0250

Area occhi, grani di miglio, punti neri e acne 1x0,8 0200 Cicatrici, rughe e imperfezioni 3x1,5 0100-0200-0250

Pelle asfittica e indurita 2x1,8 0180-0220 aree estese ed ispessite

Una proposta esclusiva su acquisto-noleggio-leasing con dilazione del pagamento fino a 48 mesi

SPA SKIN PLUS - SPECIFICHE TECNICHE

Potenza assorbita

Tensione ingresso

v 230 - 50 Hz w 50

Peso 6Kg

Dimensioni del dispositivo 40x30x15 cm

Interfaccia utente/ display touch 240x128 3,7" b/n Classe di sicurezza I / BF

Canali di uscita

Depressione massima 0,7 bar+/- 10%

Canale 1 Spatola

Tipo di emissione

Veicolazione

Tipo di emissione

Canale 2

Canale 3 Jontoforesi 2000 Hz

Ultrasuono

Frequenza di lavoro 25 KHz Frequenza di lavoro

0,9 - 2 KHz

Elettrostimolazione

La soluzione HOTEL SPA include:

- Trasporto e installazione
- Formazione in loco
- Formazione in azienda sempre gratuita
- In opzione Open Day con personale tecnico
- 300 Flyer
- Social strategy
- 1 Banner

#centriamoiltuocentro